


Montagehandleiding Ledikant Elba Excellent / Elba Royal

- Bevestig de zijdes aan het hoofd en voetbord (foto 1)
- Monteer de wielen aan de beugels (foto 2)
- Monteer de beugels met wielen aan de zijdes van het ledikant
- Plaats de lattenbodembeugels (foto 3)
- LET HIERBIJ OP DE PRIKGATEN

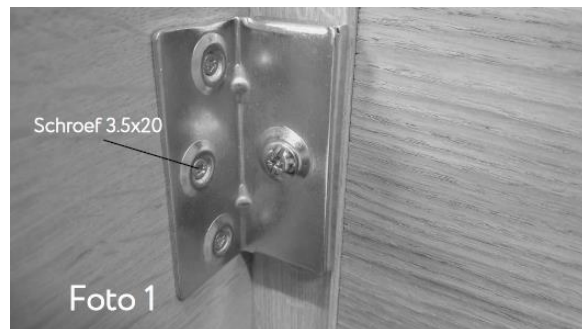

Montagehandleiding Zorgframe Elba Excellent / Elba Royal

- Monteer de beugels aan het hoofd-en voetbord (foto 4)
- Plaats het hoofd-en voetbord aan het frame (foto 5)
- Draai de inbusbouten aan het frame goed vast (foto 6)
- Schroef de beugels op de zijdes (LET OP DE PRIKGATEN) (foto 7)
- Haak de zijdes aan het frame van het zorgbed (foto 8)

