


Montagehandleiding

Elba Excellent & Elba Royal - ledikant

In deze montagehandleiding vindt u de instructies voor het monteren van ons ledikant, inclusief de zijpanelen, hoofdbord en voetbord. Let op: vanwege het gebruik van nieuwe wielen voor onze ledikanten, is de montageprocedure enigszins aangepast ten opzichte van wat u gewend bent.

Inhoud:

1. 24x schroef zwart 3.5x20
2. 12x schroef 3.5x20
3. 16x schroef 5x25
4. 16x schroef 5x25
5. 12x schroef 3.5x20
6. 8x ring M5
7. 4x ring M8
8. 4x Montagebeugel zijde
9. 4x Bevestigingsbeugel HB/VB-zijde
10. 3x Haakbeugel Kerkdeur
11. 3x Kerkdeurbeugel
12. 4x Z-Beugel
13. 4x Hoekbeugel onderstel
14. 4x zwart wiel
15. 2x Onderstelbrug

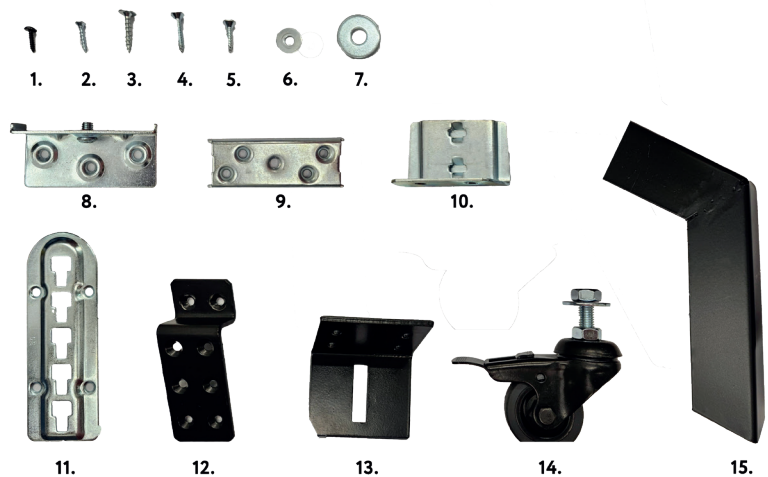

Nieuwe wijze bevestiging beugel

- Bevestig de zijdes aan het hoofd- en voetbord **(foto 1)**
- Monteer de wielen aan de stalen beugels **(foto 2)**
- Monteer de beugels met wielen aan de zijdes van het ledikant. Let hierbij op de nieuwe bevestiging waarbij de beugels "ondersteboven" wordt gemonteerd, vergeleken onze oude ledikant-wielen. **(foto 3)**
- Plaats de lattenbodembeugels **(foto 3)**
(Let hierbij op de prik-gaten)
- Plaats de kerkdeurbeugels verdeeld op 3 plaatsen zoals aangegeven op **(foto 4)**

schroef 3.5x20



Foto 1

Revet M8



Foto 2

Schroef 3.5x20
Schroef 5x25
Bout/revet M8



Foto 3



Foto 4

Montagehandleiding

Elba Excellent & Elba Royal - hoog-laag

In deze montagehandleiding vindt u de instructies voor het monteren van ons hoog-laag bedstelsel, inclusief de zijdes, hoofdbord en voetbord.

Inhoud:

1. 8x schroef 3.5x20
2. 8 x schroef 5x25
3. 8x schroef zwart 3.5x20
4. 8x ring M8
5. 4x Z-beugel
6. 4x beugel hoofd-voetbord



5.



6.

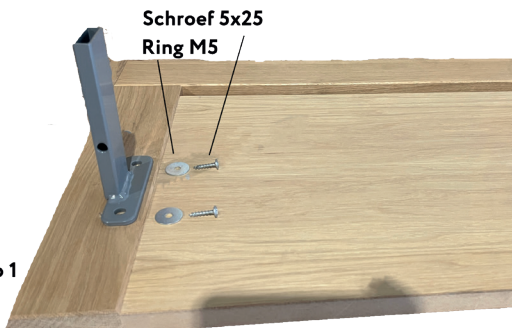


Foto 1

- Monteer de beugels aan het hoofd- en voetenbord
- Plaats het hoofd- en voetenbord aan het frame
- Draai de 2 imbusbouten aan het frame goed vast
- Schroef de beugels op de zijdes
- Let op de prik-gaten!
- Haak de zijdes aan het frame van het zorgbed

(foto 1)

(foto 2)

(foto 3)

(foto 4)

(foto 5)



Foto 2



Foto 4



Foto 3



Foto 5